

# sanasella®

**Rengjøring og vedlikehold av kunstige vinyl hud** | Ambla er motstandsdyktig mot de fleste milde syrer, alkalier, drikkevarer og husholdnings produkter. Rengjør med en fuktig såpe-klut og skyll godt med rent vann. Ikke bruk løsemidler, blekemidler eller spraybokser (klorfrigivende midler på nivåer på 1-10000 deler per million bør utgjøre ingen problemer som så lenge materialet ikke blir belastet over tid). Desinfeksjonsmidler kan brukes i fortykning som spesifisert av deres produsenter. Disse inkluderer Haz-Tabs og andre desinfeksjonsmidler vanligvis brukt i infeksjonskontrollprogrammer. Skyll godt med rent vann. Ambla-overflaten er NaDCC-kompatibel.

**Garanti** | For Sanasella gjelder leverandørens garantidatoer. Dette betyr tre års garanti på Sanasella-stolen for normal bruk. Tekstilet har et års garanti som norsk industri standard og tre år på søm. Batteriet er garantert i fem år eller 5000 ladninger, avhengig av hva som skjer først, fra garanti starts dato. Batteriet er også garantert en arbeidsdags batterikapasitet. Ved ukorrekt bruk av produktet eller skade ved et uhell eller lignende, vil garantien bli ugyldig.


© Sanasella AS | Skibåsen 44, Norway, 4636 Kristiansand

T: +47 9716 0692 | salg@sanasella.no

www.sanasella.no




# BRUKERMANUAL SANASELLA STOL

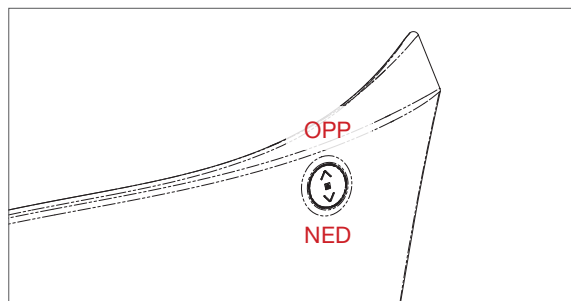



## ELEKTRISK HØYDEJUSTERING

Trykk pilen opp eller ned på knappene som er plassert på begge sider av stolen for å kontrollere setehøyden.

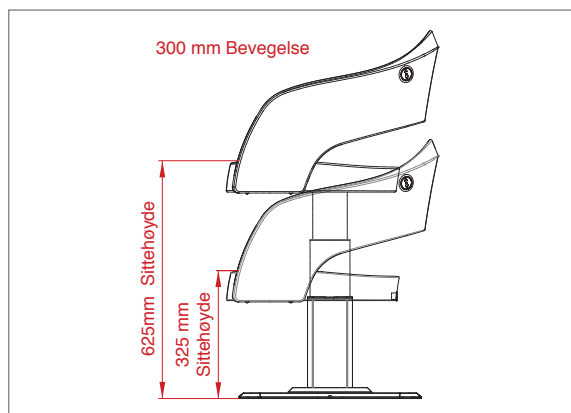


## 360° ROTASJON

Stolen svinger fritt 360° på sivelbunnen og klikk på plass når de vender fremover.

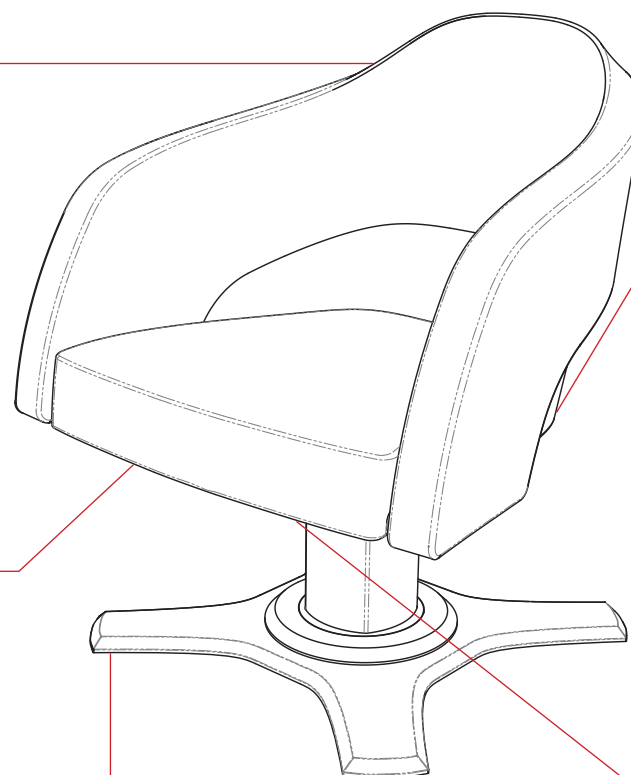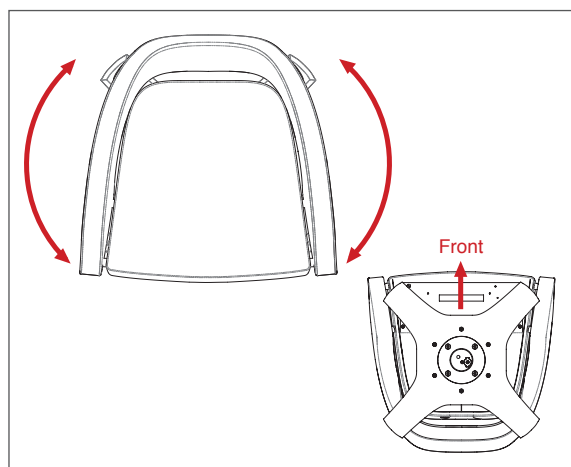



## LADE KABEL

Koble ladekabelen til stikkkontakten som vist nedenfor. Lad over natt eller hver 24 timer.

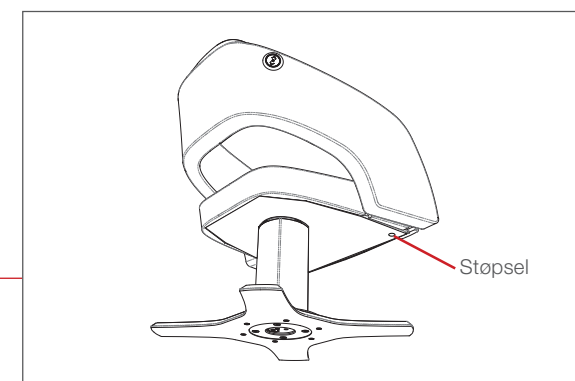

## TILGANG TIL STRØMTRAU

- Åpne skinndekelet ved å løsne borrelåsen og glidelåser.
- Fjern de 4 skruene og fjern metalldekelet.

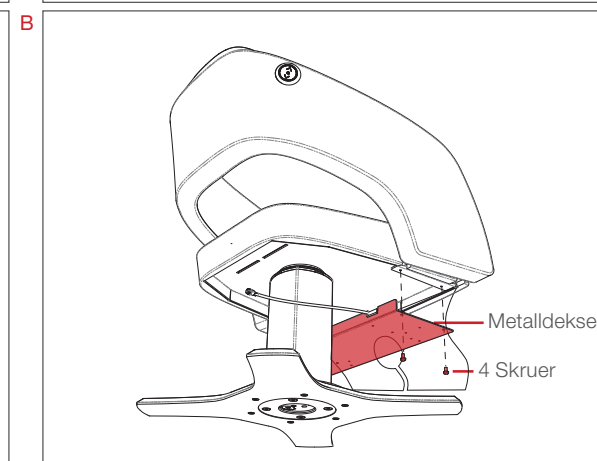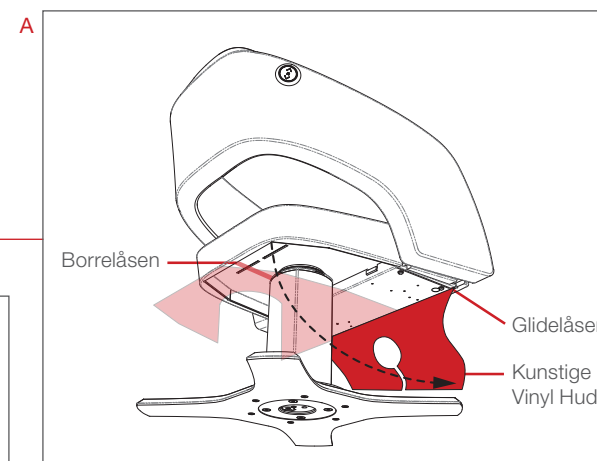


## MAKS LAST

Den maksimale belastningen som stol kolonne kan holde er 200 kg.

## BATTERI ADVARSEL

Denne stolen inneholder litium ion batterier. Stolen må være håndteres med forsiktighet. Fare fro brann kan oppstå hvis stolen er skadet. Spesielle prosedyrer må følges dersom stolen er skadet inkludert inspeksjon hvis nødvendig. Skadede celler eller batterier bør ikke være transporteres unntatt under passende forhold. For ytterligere informasjon kontakt Sanasella AS.

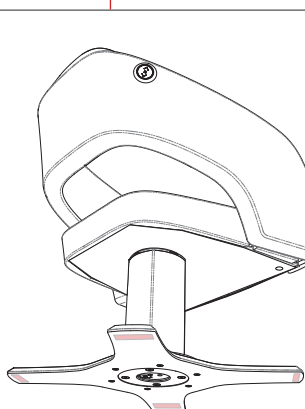

## FELT PADS

Filtputer under Stolen beskytter stolen fra skader gulvet. Vær så snill sjekk under stolen base regelmessig for å sikre det feltputer sitter der den skal.